




activheal

CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN

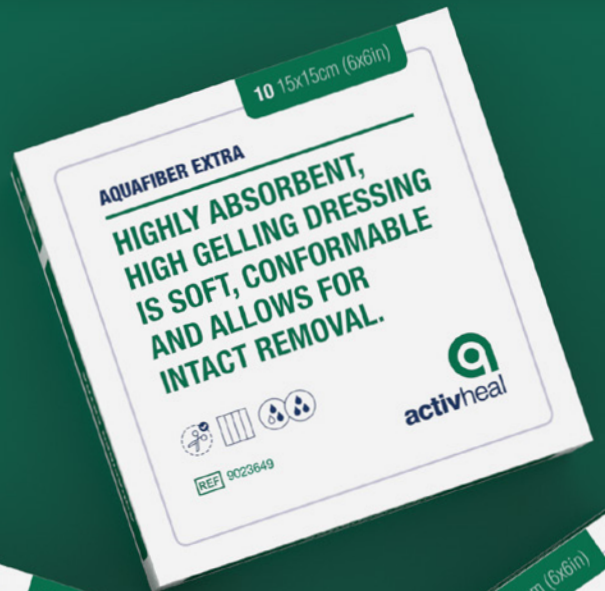

AQUAFIBER EXTRA

CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN

CARACTERÍSTICAS

Muy absorbente // Alta gelificación // El apósito puede permanecer colocado durante un máximo de 7 días // Reduce el riesgo de maceración // Mantiene un ambiente húmedo de cicatrización para la herida // Contribuye al desbridamiento autolítico // Alta resistencia a la tracción húmeda //

ACTIVHEAL® AQUAFIBER EXTRA CREA UN AMBIENTE HÚMEDO DE CICATRIZACIÓN PARA HERIDAS CON EXUDADO DE MODERADO A INTENSO.

ActivHeal® Aquafiber Extra es una combinación innovadora de dos tecnologías demostradas para el cuidado de heridas basadas en fibras de CMC y alginato. Contiene una capa oculta de integridad que contribuye al rendimiento de la tracción.

ActivHeal® Aquafiber Extra es un apósito suave, adaptable, muy absorbente y sin tejer que se convierte en un gel suave y cohesivo cuando entra en contacto con el exudado de la herida. De esta forma, contribuye al desbridamiento autolítico y mantiene un ambiente húmedo de cicatrización para la herida siguiendo los principios del cuidado de heridas avanzado. ActivHeal® Aquafiber Extra aborda de forma eficaz los principales retos de la gestión mejorada del exudado, la gelificación y el rendimiento de la tracción.


RENDIMIENTO

Gran absorbencia

El diseño exclusivo y la ingeniería de fibras de ActivHeal® Aquafiber Extra permite que el apósito absorba el exudado y se transforme en un gel cohesivo.

Alta resistencia a la tracción húmeda

El patrón de acolchado de ActivHeal® Aquafiber Extra está respaldado por una capa oculta de integridad que permite una retirada intacta del apósito.

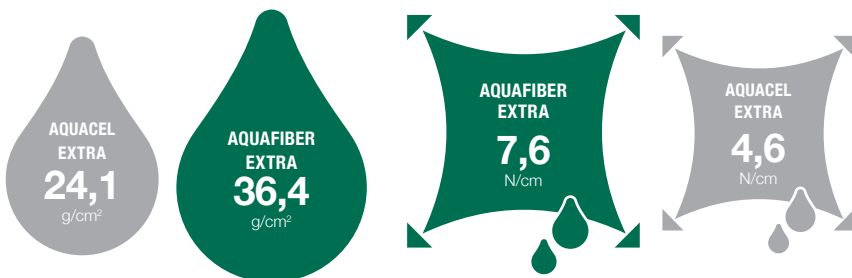

Aumento de la absorción capilar vertical

Los análisis internos¹ han confirmado que la absorción capilar vertical de ActivHeal® Aquafiber Extra podría ser útil a la hora de prevenir la maceración en la piel que rodea la herida.

INDICACIONES

ActivHeal® Aquafiber Extra está indicado para el tratamiento de las siguientes heridas crónicas y agudas con exudado de moderado a intenso:

- Úlceras de decúbito
- Úlceras venosas en piernas
- Úlceras arteriales en piernas
- Úlceras diabéticas
- Áreas de injertos y donantes
- Heridas quirúrgicas posoperatorias
- Heridas cavitadas
- Quemaduras superficiales y de grosor parcial

Exudado moderado > intenso




Tipos de heridas



- De granulación
- Con escaras
- Necróticas
- Cavitadas

- ✓ GRAN ABSORBENCIA¹
- ✓ ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN HÚMEDA¹
- ✓ AUMENTO DE LA ABSORCIÓN CAPILAR VERTICAL¹

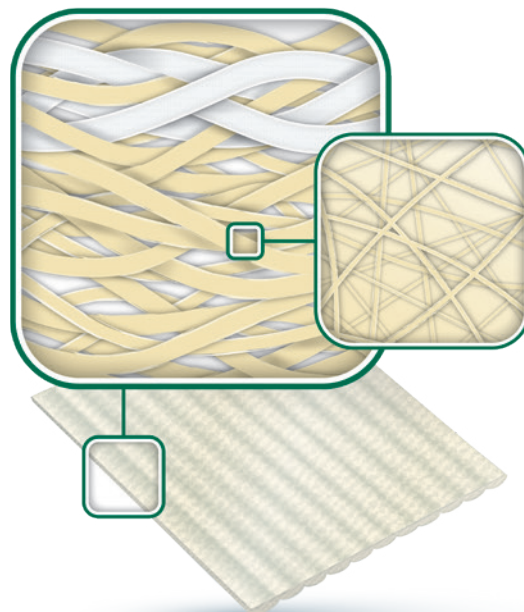

TAMAÑOS Y CÓDIGOS

ACTIVHEAL® AQUAFIBER EXTRA

TAMAÑO (CM)	CANT. POR CAJA	CANT. POR CAJA	CÓDIGO DE PRODUCTO
5x5	10	10	9023625
10x10	10	10	9023632
15x15	5	10	9023649
20x30	5	10	9023656
2,5x30,5 cinta	5	10	9023663
2x46 cinta	5	10	9023670

Advanced Medical Solutions Ltd

Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Reino Unido
T +44 (0)8444 125 755 CE activheal@admedsol.com Web www.activheal.com



Referencias 1. Datos de AMS en archivo LD024-16, LD037-16.

ActivHeal es una marca registrada de Advanced Medical Solutions.

© Advanced Medical Solutions 2020 // Fecha de revisión mayo de 2020 // Código del documento AMS/AH-012-01