




CUIDADO DE HERIDAS  
PORQUE LE IMPORTAN

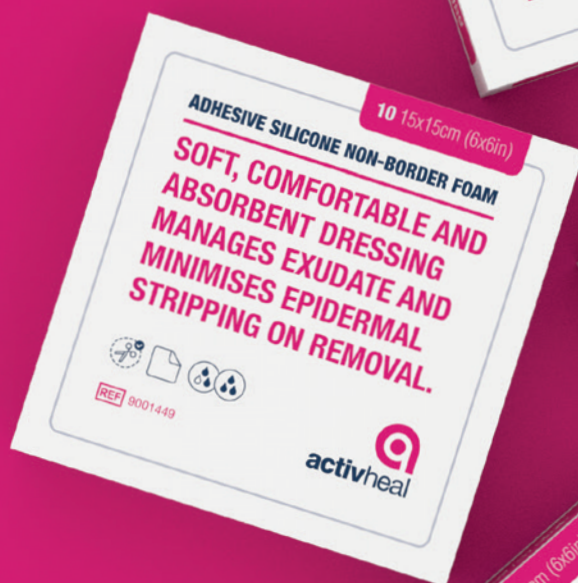

GAMA DE ESPUMA  
DE SILICONA

CUIDADO DE HERIDAS  
PORQUE LE IMPORTAN

## CARACTERÍSTICAS

Muy adaptable // Gran absorción del exudado // Puede dejarse colocado durante un máximo de 7 días // Reduce la abrasión con esparadrapo epidérmica // Favorece la cicatrización a través de un ambiente húmedo para la herida // Evita el dolor en los cambios de apósito // Protege la zona que rodea la herida // Para heridas con exudado de moderado a intenso //

# LOS APÓSITOS DE ESPUMA DE SILICONA ACTIVHEAL® TIENEN UNA ADHESIÓN SUAVE PERO FIRME CON UNA ABRASIÓN CON ESPARADRAPO EPIDÉRMICA O DOLOR EN LA RETIRADA MÍNIMOS


Apósitos de espuma de silicona ActivHeal® con y sin borde de varias capas fabricados con una película de poliuretano de baja fricción e impermeable, con un parche central de poliuretano de gran absorción y una capa de contacto superior adhesiva de silicona.

Los apósitos de espuma de silicona ActivHeal® con y sin borde se usan cuando la adherencia a la herida puede representar un problema debido a la fragilidad de la piel. La capa de contacto con la herida con recubrimiento de silicona perforada evita que el apósito se pegue a la herida y reduce el dolor durante los cambios de apósito. La perforaciones permiten la absorción del exudado y evita un exceso de líquidos que provoca la maceración en la piel sana. Los apósitos de espuma de silicona ActivHeal® con y sin borde mantienen un ambiente húmedo para la herida y contribuyen al proceso de cicatrización de esta.



## RENDIMIENTO

**Rendimiento total de la gestión de líquidos<sup>1</sup>**  
Confíe en que esta espuma puede gestionar el exudado de heridas.

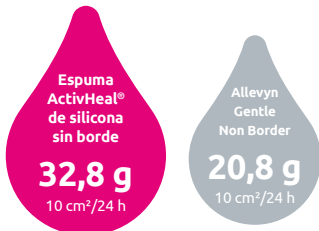

**Adhesión a la descamación<sup>2</sup>**  
Firme pero sin dolor a la retirada.




## TAMAÑOS Y CÓDIGOS

ACTIVHEAL®		ESPUMA DE SILICONA CON BORDE	ESPUMA DE SILICONA SIN BORDE
TAMAÑO (CM)	CANT.	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO DE PRODUCTO
5x5	10		9001548
7,5x7,5	10	9001470	9001555
10x10	10	9001487	9001562
12,5x12,5	10	9001494	
10x20	10	9001500	9001579
15x15	10	9001517	9001449
20x20	10	9001524	9001586
18x18,5 sacro	10	9001531	

La espuma de silicona ActivHeal® está disponible a través de una variedad de canales.

## CASO PRÁCTICO

Paciente X, señora de 72 años que presenta daños por compresión después de la retirada de una escayola completa en la pierna derecha al haberse fracturado rúcula derecha. Tenía antecedentes de diabetes, hipotiroidismo y cirrosis y la paciente presentaba poca movilidad. Después de una evaluación completa de la herida por parte del personal de curas, se clasificó la herida como con presencia de pérdida total de grosor del tejido y presentaba tejido de granulación con zonas de escaras. Se le diagnosticó una úlcera de decúbito de categoría 3.

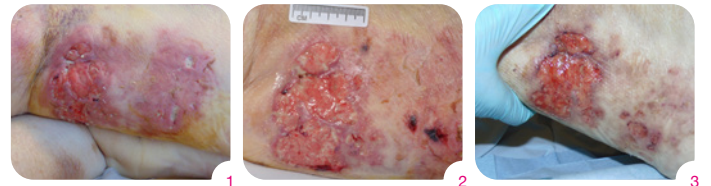

- Día 1: los niveles de exudado eran altos. La piel circundante presentaba zonas de eritema, aunque sin maceración ni excoriación. Se aplicaron apósitos de silicona ActivHeal® sin borde para ayudar a gestionar el exudado, evitar la adherencia y el traumatismo durante los cambios de apósito, así como para proporcionar un ambiente húmedo para la herida para contribuir a su cicatrización. Se aplicó un apósito de miel debajo de la espuma y se utilizó una venda para fijar los apósitos.
- Día 3: en el 2.º cambio de apósito, la herida mostraba signos de mejora con una reducción del eritema. No presentaba signos de maceración ni excoriación, lo que indicaba que los apósitos estaban gestionando bien el exudado. Se prosiguió con la pauta de apósitos.
- Día 13: la herida seguía progresando y reduciendo su tamaño, con zonas visibles de tejido epitelial nuevo. Seguía sin haber signos de maceración ni excoriación en la piel circundante, lo que demostraba que el exudado se estaba gestionando bien. La espuma de silicona ActivHeal® sin borde fue fácil de quitar y fue atraumática para la paciente.

## INDICACIONES


Los apósitos de espuma de silicona ActivHeal® con y sin borde están indicados para su uso en heridas crónicas y agudas con exudado de moderado a intenso. Los apósitos se pueden utilizar a lo largo del proceso de cicatrización en:

- Úlceras venosas y arteriales de la pierna
- Úlceras diabéticas
- Heridas quirúrgicas posoperatorias
- Heridas traumáticas
- Úlceras de decúbito
- Quemaduras superficiales y de grosor parcial
- Abrusiones de la piel
- Uso como apósito secundario en heridas cavitadas

Exudado moderado > intenso



Tipos de heridas

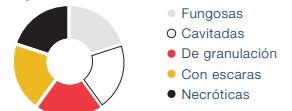

Los apósitos de espuma ActivHeal® de silicona son aptos su uso en vendajes de compresión.

## Advanced Medical Solutions Ltd

Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Reino Unido  
T +44 (0)8444 125 755 CE activheal@admedsol.com Web www.activheal.com

