



CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN



ADAPTABLE



CICATRIZACIÓN DE
HERIDAS HÚMEDAS



PROTEGE LA ZONA
QUE RODEA LA
HERIDA



EXCELENTE
ABSORCIÓN

ESPUMA ADHESIVA

CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN


CARACTERÍSTICAS

Excelente absorción del exudado // Versátil // Favorece la cicatrización a través de un ambiente húmedo para la herida // Reduce el riesgo de maceración // Película impermeable // Barrera bacteriana // Adaptable //

LA ESPUMA ADHESIVA ACTIVHEAL® ES UN APÓSITO DE ESPUMA ABSORBENTE ÓPTIMO PARA HERIDAS CON EXUDADO DE MODERADO A INTENSO

La espuma ActivHeal® adhesiva es un apósito de varias capas indicado para heridas con exudado de moderado a intenso. Cada una de las capas de la espuma adhesiva ActivHeal® contribuyen al rendimiento del apósito.

El apósito consta de un parche de espuma absorbente de poliuretano y de una membrana de poliuretano. El núcleo del apósito es una capa de espuma absorbente de poliuretano que absorbe el exudado de la herida de forma rápida y vertical hacia el apósito. El parche absorbente retiene el exudado en el apósito, lo que evita que el exudado vuelva a penetrar en la herida, evitando así la maceración de la zona que rodea la herida y la piel circundante.

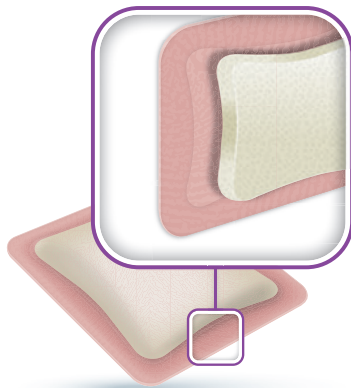

Indicado para heridas con exudado de moderado a intenso, el apósito ofrece un adhesivo acrílico sensible a la presión con borde, lo que garantiza que el apósito permanezca colocado a la vez que permite al paciente seguir con sus actividades diarias con confianza. El apósito se adapta a los contornos del cuerpo, lo que reduce el riesgo de arrugas o que se enganche en la ropa o la ropa de cama. La espuma adhesiva ActivHeal® cuenta con el beneficio añadido de una película impermeable.

TAMAÑOS Y CÓDIGOS

TAMAÑO (CM)	APÓSITOS POR CAJA	CÓDIGO DE PRODUCTO
7,5x7,5	10	10010232
10x10	10	10009109
12,5x12,5	10	10009110
15x15	10	10009111
20x20	10	10009112

CASO PRÁCTICO

La paciente H es una señora de 82 años que vive en una residencia de ancianos. La paciente tenía una úlcera de decúbito de categoría 3 con exudado moderado situada sobre la zona del cóccix, desde hace 6 meses.



- Día 1: la herida presentaba tejido de granulación sano; no obstante, se había vuelto inerte. El tejido alrededor de la herida estaba hidratado, sano y no le causaba molestias. Los niveles de exudado seguían siendo moderados.
- Día 9: la herida seguía mejorando con buen crecimiento epitelial. Seguía sin causar apenas molestias a la paciente y no presentaba signos de reacciones cutáneas alrededor de la úlcera. El apósito fue fácil de aplicar, retirar y fue atraumático para la paciente.
- Día 24: la herida había seguido progresando a través del proceso continuo de cicatrización de la herida con un aumento en la cantidad de tejido epitelial visible y una ligera reducción en el tamaño.

INDICACIONES

La espuma ActivHeal® adhesiva está indicada para heridas con exudado de moderado a intenso:

- Úlceras de decúbito
- Úlceras venosas en piernas
- Úlceras diabéticas
- Heridas quirúrgicas posoperatorias
- Quemaduras superficiales y de grosor parcial
- Heridas cavitadas (como apósito secundario)
- Laceraciones
- Abrasiones
- Heridas de injerto y áreas donantes

Exudado moderado > intenso



Tipos de heridas



Los apósitos de espuma adhesiva ActivHeal® son aptos su uso en vendajes de compresión.

Advanced Medical Solutions Ltd

Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Reino Unido
T (+44 (0)8444 125 755 CE activheal@admedsol.com Web www.activheal.com

