



CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN



ADAPTABLE



PROTEGE LA ZONA
QUE RODEA LA
HERIDA



EXCELENTE
ABSORCIÓN

ESPUMA NO ADHESIVA

CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN


CARACTERÍSTICAS

Excelente absorción del exudado // Favorece la cicatrización a través de un ambiente húmedo para la herida // Reduce el riesgo de maceración // Refuerzo de baja fricción // Capa de contacto con la herida de baja adherencia // Suave y adaptable // Perfecto en condiciones de compresión //

LA ESPUMA ACTIVHEAL® NO ADHESIVA CREA UN AMBIENTE DE CICATRIZACIÓN HÚMEDO PARA LA HERIDA

La espuma ActivHeal® no adhesiva es un apósito versátil que se ha desarrollado para ofrecer protección y absorción en heridas con exudado de moderado a intenso.

Su fabricación en varias capas ofrece un refuerzo de baja fricción, una espuma suave de gran absorción y una capa de contacto con la herida perforada. Este apósito no adhesivo es ideal cuando reducir el traumatismo es fundamental en la pauta con apósitos para la herida. Sus propiedades suaves y flexibles implican que los pacientes pueden llevarla bajo la ropa con comodidad y confianza. La gama de espuma ActivHeal® no adhesiva ofrece una variedad de formas y tamaños, como el apósito para el talón de espuma ActivHeal®, un apósito suave de varias capas premoldeado, diseñado concretamente para aplicarlo con facilidad sobre el talón y otras zonas anatómicas de prominencia ósea. El apósito de espuma para traqueotomía de varias capas ActivHeal® presenta una abertura versátil, lo que le permite adaptarse perfectamente al tubo de traqueotomía, al tubo de intubación, a la inserción de la sonda, a los fijadores de huesos externos y a los tubos de drenaje para herida adaptado adecuadamente a su tamaño.

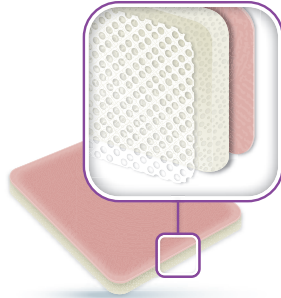

CASO PRÁCTICO


La paciente A ingresó en el centro con un considerable desgarro reciente de la piel en la parte izquierda de la cresta tibial. La piel de la pierna derecha corría el riesgo de una descomposición mayor. Sus antecedentes médicos incluían hemiparesia izquierda debido a un infarto cerebral, artrosis, hipertensión, zóster y desánimo.



- Día 1:** se evaluó la herida y el desgarro de la piel medía 7 cm en su punto más ancho. Se había producido una separación de la dermis y la epidermis. En el extremo distal, se había perdido el colgajo epidérmico, lo que había dejado expuesta una zona pequeña de tejido dérmico. La herida no presentaba zonas de necrosis ni de escaras, niveles moderados de exudado ni signos de infección. Además, el colgajo también era factible.
- Día 11:** la herida seguía mostrando mejoría después del uso de la espuma ActivHeal® no adhesiva. Los márgenes proximales de la herida estaban ahora yuxtapuestos. No había signos de maceración ni descomposición en la piel circundante. La superficie de la herida se había reducido y contenía tanto tejido de granulación como tejido epitelial.
- Día 31:** la herida mostraba un buen nivel de cicatrización y, como consecuencia, se dio de alta a la paciente del hospital de vuelta al centro de salud. Se solicitó personal de enfermería a domicilio para humedecer ambas piernas y, luego, continuar con la espuma ActivHeal® no adhesiva, fijada con una venda tubular para proteger el tejido delicado recién cicatrizado y evitar la descomposición del tejido.

RENDIMIENTO

Gestión total de líquidos (g/cm²)¹

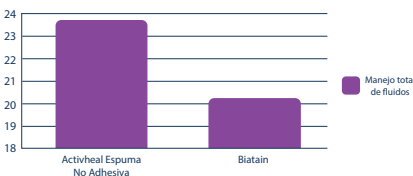

TAMAÑOS Y CÓDIGOS

TAMAÑO (CM)	APÓSITOS POR CAJA	CÓDIGO DE PRODUCTO
5x5	10	10009113
7,5x7,5	10	10009114
10x10	10	10009115
10x20	10	10011265
20x20	10	10009117
ESPUMA PARA TALÓN		
18x12	5	10010227
ESPUMA PARA TRAQUEOTOMÍA		
10x10	10	10009118

INDICACIONES

La espuma ActivHeal® no adhesiva está indicada para heridas con exudado de moderado a intenso:

- Úlceras de decúbito
- Úlceras venosas en piernas
- Úlceras diabéticas
- Heridas quirúrgicas posoperatorias
- Quemaduras superficiales y de grosor parcial
- Laceraciones
- Abrusiones
- Heridas de injerto y áreas donantes
- Heridas cavitadas como apósito secundario

Exudado moderado > intenso



Tipos de heridas



Advanced Medical Solutions Ltd

Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Reino Unido
T +44 (0)8444 125 755 **CE** activheal@admedsol.com **Web** www.activheal.com

