




activheal

CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN

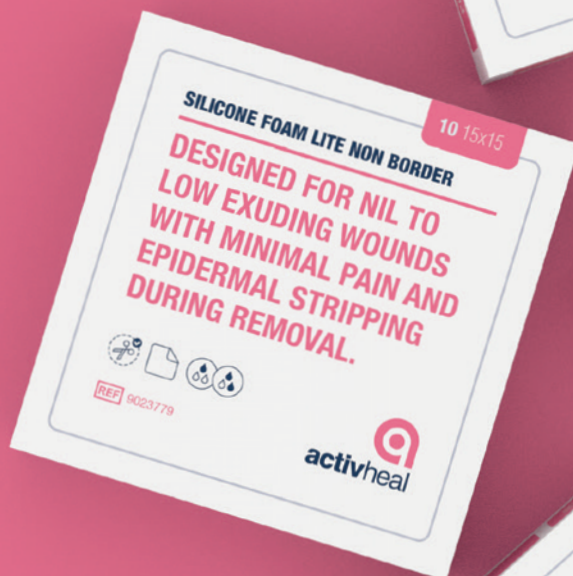

**GAMA DE ESPUMA
DE SILICONA LITE**

**CUIDADO DE HERIDAS
PORQUE LE IMPORTAN**

CARACTERÍSTICAS

- // Transpirable // Adhesión suave y firme a la piel // Baja fricción: impermeable y barrera bacteriana //
- // El apósito es fácil de quitar // Abrasión con esparadrapo epidérmica y dolor durante la retirada mínimos //
- // El apósito puede permanecer colocado durante un máximo de 7 días

LA ESPUMA DE SILICONA ADHESIVA ACTIVHEAL® LITE ES UN APÓSITO ESTÉRIL PARA HERIDAS. ES SUAVE, FINO, DISCRETO Y ADAPTABLE A LOS CONTORNOS ANATÓMICOS.

El apósito es transpirable y funciona con heridas con nivel de exudado nulo o bajo. El apósito es fácil de quitar y proporciona una adhesión suave pero firme a la piel con una abrasión con esparadrapo epidérmica y dolor durante la retirada mínimos.

El apósito de espuma de silicona ActivHeal® Lite posee una estructura de varias capas que consta de una capa central de espuma, hidrófila, absorbente, de poliuretano y de una capa exterior transpirable de baja fricción, de película de poliuretano, que proporciona una barrera impermeable y bacteriana. La capa de contacto con la herida es una película perforada de silicona recubierta adhesiva.

El apósito de espuma de silicona ActivHeal® Lite gestiona el exudado en heridas con nivel de exudado nulo o bajo y proporciona un ambiente húmedo para la herida, lo que contribuye al proceso de cicatrización de la herida. El apósito ayuda a reducir la maceración y los daños a la piel circundante.

La capa de contacto de silicona para heridas perforada contribuye a una retirada atraumática, permite la absorción del exudado y evita la penetración de tejido de granulación en el apósito. Los apósitos de espuma de silicona ActivHeal® se pueden recolocar durante la aplicación o levantar durante el tiempo de uso para observar la herida.




TAMAÑOS Y CÓDIGOS

ACTIVHEAL®		ESPUMA DE SILICONA LITE CON BORDE	ESPUMA DE SILICONA LITE SIN BORDE
TAMAÑO (CM)	CANT.	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO DE PRODUCTO
5x5	10	9023687	
5,5x12	10	9023694	
7,5x7,5	10	9023700	9023755
10x10	10	9023717	9023762
15x15	10	9023724	9023779
10x20	10	9023731	9023786
10x30	10	9023748	

RENDIMIENTO

Rendimiento total de la gestión de líquidos¹

Confíe en que esta espuma puede gestionar el exudado de heridas.

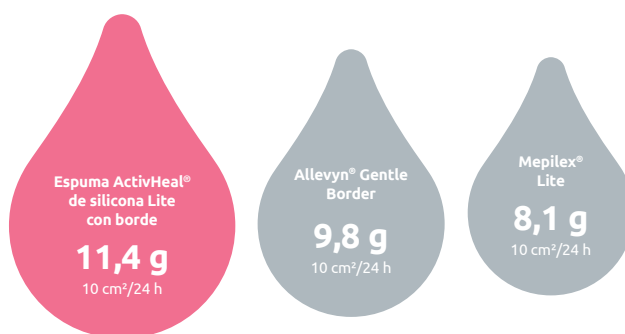

INDICACIONES

El apósito de espuma de silicona ActivHeal® Lite está indicado para su uso en el tratamiento de heridas con nivel de exudado nulo o bajo, que son crónicas y agudas a lo largo del proceso de cicatrización. El apósito está indicado para su uso en las siguientes heridas:

- Úlceras de decúbito
- Úlceras diabéticas
- Úlceras en pies y piernas
- Heridas quirúrgicas posoperatorias
- Heridas traumáticas (como laceraciones, abrasiones, desgarros de la piel y ampollas)
- Quemaduras superficiales y de grosor parcial
- Piel dañada por la radiación



Los apósitos de espuma de silicona ActivHeal® Lite son aptos su uso en piel frágil y en vendajes de compresión.

Advanced Medical Solutions Ltd

Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Reino Unido
T +44 (0)8444 125 755 CE activheal@admedsol.com Web www.activheal.com

